


Sa-Va uppomallisen kaasunottoventtiilin asennusohje

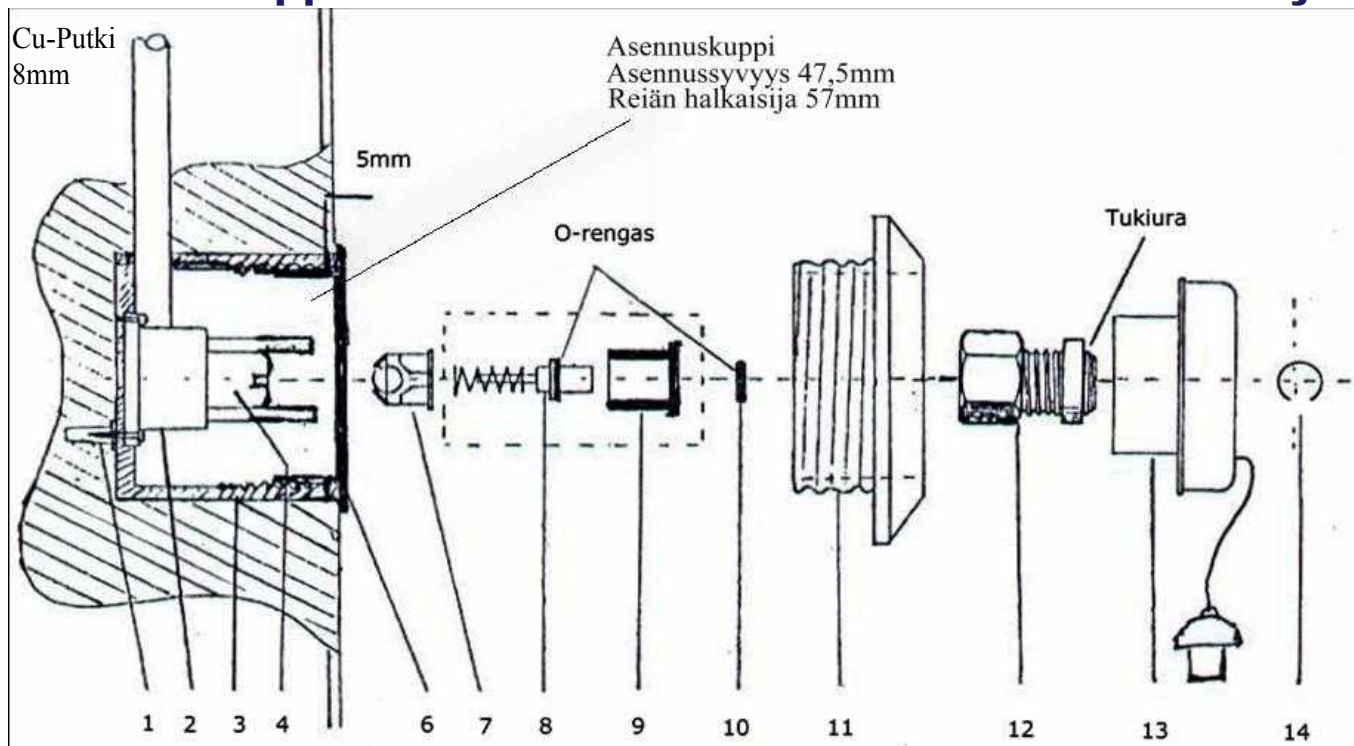

Asennus: Asennustuen **1** merkitys työn lopputuloksen kannalta on ensiarvoisen tärkeä.

Tuen on oltava tukeva ja ehdottomasti seinän suuntainen ja useampien rinnakkaisten kaasunottoventtiilien tuen on oltava yhtenäinen.

Asennuskotelo **3** ja venttiilin runko **2** kiinnitetään neljällä (4) ruuvilla asennustukeen niin, että **asennus-kotelon etureuna tulee valmiin seinäpinnan sisälle n. 5 mm**. Peitelevyn säätövaraksi valmiin seinän pintaan jää ± 5 mm. Asennuskotelo **3** suojataan seinän valun ja maalauksen ajaksi painamalla suojakansi **6** asennuskotelon sisälle. Suojaus on tärkeää, että kierteet pysyvät puhtaina myöhemmin tapahtuvaa kalustusta varten. Koeponnistustulppa **4** asennetaan paikoilleen.

Kalustaminen: Koeponnistuksen jälkeen poistetaan koeponnistustulppa **4** ja suojakansi **6**. Kalustaminen aloitetaan kiertämällä kuusio-koloavaimella (erikoistyökalu) huoltoventtiili **7** venttiilirungon **2** pohjaan. (Huom! Kierteeseen ei saa laittaa tiivistysnauhaa) Kalustaminen jatkuu yllä olevan kuvan mukaisessa järjestyksessä, sulkuventtiilin osat **8-9-10**. Nämä lukitaan paikalleen tunnusholkki **12** avulla. Tunnusholkin etupuolella oleva tukiura asennetaan ylöspäin asentoon "klo 12" (erikoistyökalu). Tämän jälkeen painetaan kyseisen kaasulajin tunnuksella varustettu painolevy **13** tunnusholkin päälle (Huom! tekstin asento.) ja lukitaan jousirengas **14**. Lopuksi kierretään paikoilleen peitelevy **11**. Kokeile kaasunottoventtiilin toimivuus kyseisen kaasun koiras-pikaliittimellä. Jos painike ei vapauta pikaliittintä tai painikkeen liike on jäykkä, tarkasta venttiilirungon kiinnitys.

Asennus tapahtuu helpoimmin käyttämällä erikoistyökaluja (tuotenumerot 411098 ja 411099)

Kaasunottoventtiilit	Tilausno
O2 Happi	411101
N20 Ilokaasu	411102
Paineilma	411103
Kaasunpoisto	411104
Imu/vakuumi	411105
Instrumenttipaineilma	411106
Erikoistyökalu, L-avain	411099
Erikoistyökalu, holkki	411098

HUOM ! Kaasulaji on stanssattu venttiilirunkoon.
Venttiilin runko sopii vain kyseiselle kaasulle

Jokaisella kaasulajilla on turvallisuussyistä eri kierre

Sa-Va Sairaala-Varuste Oy
Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI
Puh.09-561 7120 Fax.09-7001 7183
info@sa-va.fi www.sa-va.fi